



Come settare DATA e ORA del dispositivo

E' molto importante che il dispositivo abbia sempre la data e l'ora impostati correttamente

RICORDARSI di regolare l'orario in concomitanza dei cambi ora legale/ora solare

Istruzioni di settaggio:

- Inserire una batteria carica > inserire il cavo paziente > sbloccare il display pigiando i tasti suggeriti dal simbolo 
- premere il tasto INVIO 
- spostarsi con la freccia GIÙ alla voce MENU e premere il tasto INVIO 
- scendere con la freccia GIÙ alla voce SETTING e premere il tasto INVIO 
- scendere con la freccia GIÙ alla voce DATE & TIME e premere il tasto INVIO 
- posizionarsi con la freccia GIÙ sopra il campo che si vuole modificare (evidenziato tra parentesi quadre) e premere il tasto INVIO  il formato è AAAA-MM-GG e HH:MM:SS
- Utilizzare le frecce SU e GIÙ per impostare il valore corretto e premere il tasto INVIO 
- scendere con la freccia GIÙ su RETURN e premere il tasto INVIO 
- salire con la freccia SU alla voce ECG PREVIEW e premere il tasto INVIO 

A questo punto è possibile eseguire la consueta procedura per l'avvio dell'esame